

# MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE



**ADVERTENCIA:** Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la directiva 93/42/CEE o del Reglamento UE 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento de UE 2016/425

## INSTRUCCIONES DE USO



- Lavar mascarilla previamente antes de su uso.
- Lavarse las manos previamente, colocar cubriendo la boca, y barbilla.
- Retirar con precaución sin tocar la cara con las manos sucias.
- Desinfectar o lavar después de cada uso.

## COMPOSICIÓN TEJIDOS

EXTERIOR Microfibra 83 grm2 100/Poliéster ISO 9002 QA:041007492  
 INTERIOR POPELIN 110GR M2 65% Poliéster 35% algodón MARCADO CE-11216



## TEST DE FILTRADO

Objeto de test	Método de test	Resultado	Unidad	Solicitud de color	UNE-EN ISO 05
Eficacia en la filtración de aerosoles	UNE-EN 605:2004+A5:2010	>95%	%	Resistencia al peeling	UNE-EN ISO 12945-2
Eficacia en la filtración de partículas	UNE-EN 605:2004+A5:2010	>96%	%	Resistencia a la penetración microbiana-seco	UNE-EN ISO 05
Ajuste facial (ajuste nariz boca)				Resistencia a la penetración microbiana-humedad	EN 13795
Respirabilidad	ASTL	PA	%	Resistencia a la penetración de líquidos	EN 13795

- Todas las pruebas han tenido en cuenta la directiva Europea 93/42/CEE.  
 -El informe Técnico para determinar el proceso de lavado idóneo para este género, así como la durabilidad en número de lavados del mismo.  
 -Con la muestra de mascarilla facilitada, puede considerarse idónea como mascarilla de uso reutilizable.

-Las Pruebas se han habilitado sobre filtración de partículas de 0,3 micras de diámetro y mayores. Por lo tanto cumple normativa Mascarillas Higienicas reutilizables, UNE0065/2020.  
 -Las pruebas han habilitado simulando las zona de mayor roce de una mascarilla de uso sanitario  
 Resultado: (5 max) sve han seguido los protocolos de la norma UNE-EN ISO 12945-2

## PROCESO DE LAVADO

- Proceso de lavado utilizar lejía, podría afectar a las características de los tejidos.
- Solo utilizar suavizante bactericida en el último lavado. En el caso de no ser bactericida no utilizar ningún tipo de suavizante si se gusta echar suavizante, este debería estar exento de colorantes.
- Solo utilizar prelavado y el tejido.
- Incorpora manchas o suciedad es que se fijarán con la temperatura del lavado. En caso contrario no es necesario utilizar prelavado.
- Utilizar nivel de agua medio en el lavado. Tiempo de lavado 10-12 minutos.

- Temperatura de lavado inferior a 60 grados.
- Detergente humectante.
- PH ligeramente alcalino no + pH 10.
- Enjuague solo con agua tres ciclos.
- El tiempo de centrifugado estará condicionado a las revoluciones de la máquina lavadora y su factor K.
- Los símbolos de mantenimiento que a continuación introducimos son los símbolos adecuados en los procesos

TRATAMIENTO DE CONSERVACION



**SERPUBLI**  
 CEBADO PUBLICIDAD AND MERCHANDISING

100

95

75

25

5

0